

VERMEIREN

Luna 2, Luna Basic 2, Luna UL 2

MANUAL DE INSTALACIÓN





Índice

Índice	1
Introducción.....	2
1 El producto.....	3
2 Paquete de entrega.....	5
3 Montaje	6
3.1 Herramientas	6
3.2 Montaje de la cama	7
3.3 Descarga de tensión y cable de alimentación.....	10
3.4 Colocación de cables.....	11
3.5 Transporte.....	12
3.6 Incorporador (opcional).....	14
3.7 Bajada de emergencia del cabecero	14

ES

Introducción

Le presentamos este manual de instalación para ayudarle con la instalación y cualquier reparación de esta cama articulada. Por favor léalo detenidamente. Si todavía tiene alguna duda después de leer este manual, póngase en contacto con Vermeiren.

La información contenida en este manual es aplicable a la(s) siguiente(s) cama(s):

- Luna 2
- Luna Basic 2
- Luna UL 2

Nota importante

Hay imágenes del producto para ayudar a explicar las instrucciones. Los detalles del producto mostrado pueden variar según el producto.

Información disponible

En nuestro sitio web <http://www.vermeiren.com/> siempre encontrará la versión más reciente de la siguiente información. Consulte este sitio web de manera regular para estar al tanto de posibles actualizaciones.

Las personas con discapacidad visual pueden descargarse la versión electrónica del manual y utilizar un software de síntesis de voz para poder oír su contenido.



Manual de usuario
Para el usuario y el distribuidor especializado



Manual de instalación
Para el distribuidor especializado



Manual de mantenimiento para camas
Para el distribuidor especializado




Despieces (de recambio)
Para el distribuidor especializado




Declaración CE de conformidad

1 El producto

ES

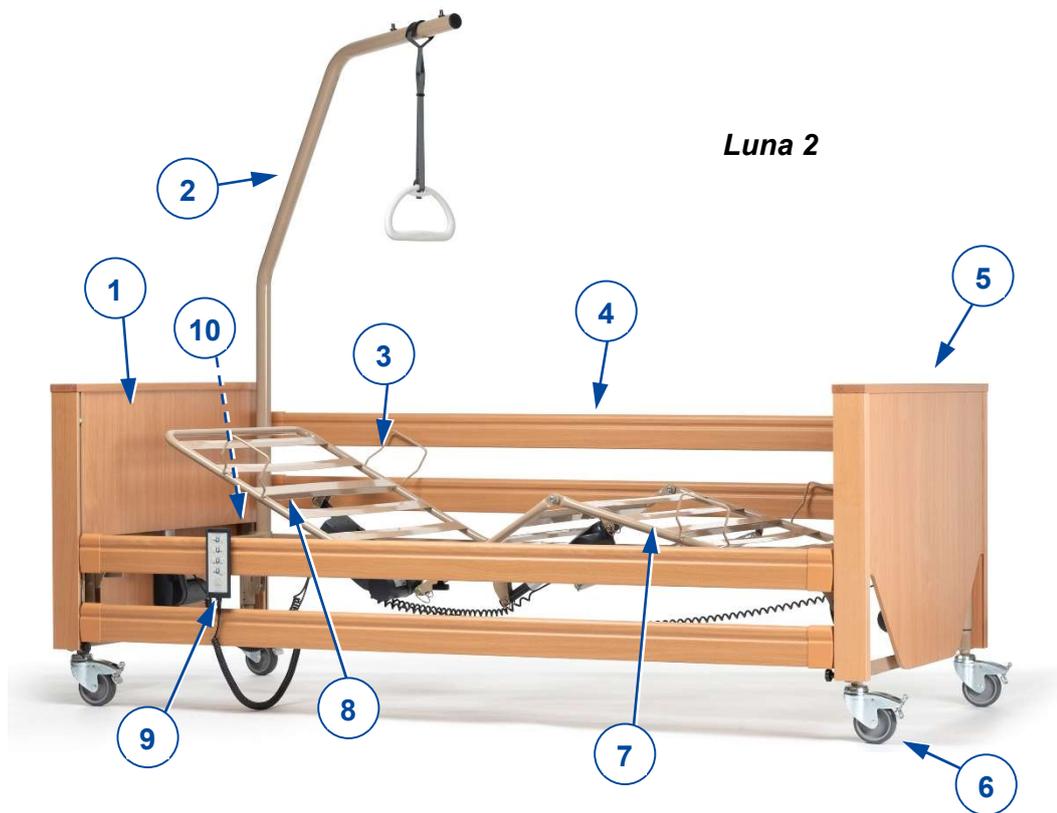


1. Cabecero
2. Soporte
3. Tope de colchón
4. Barandilla lateral
5. Piecero
6. Rueda
7. Pies
8. Cabecera
9. Mando
10. Número de serie

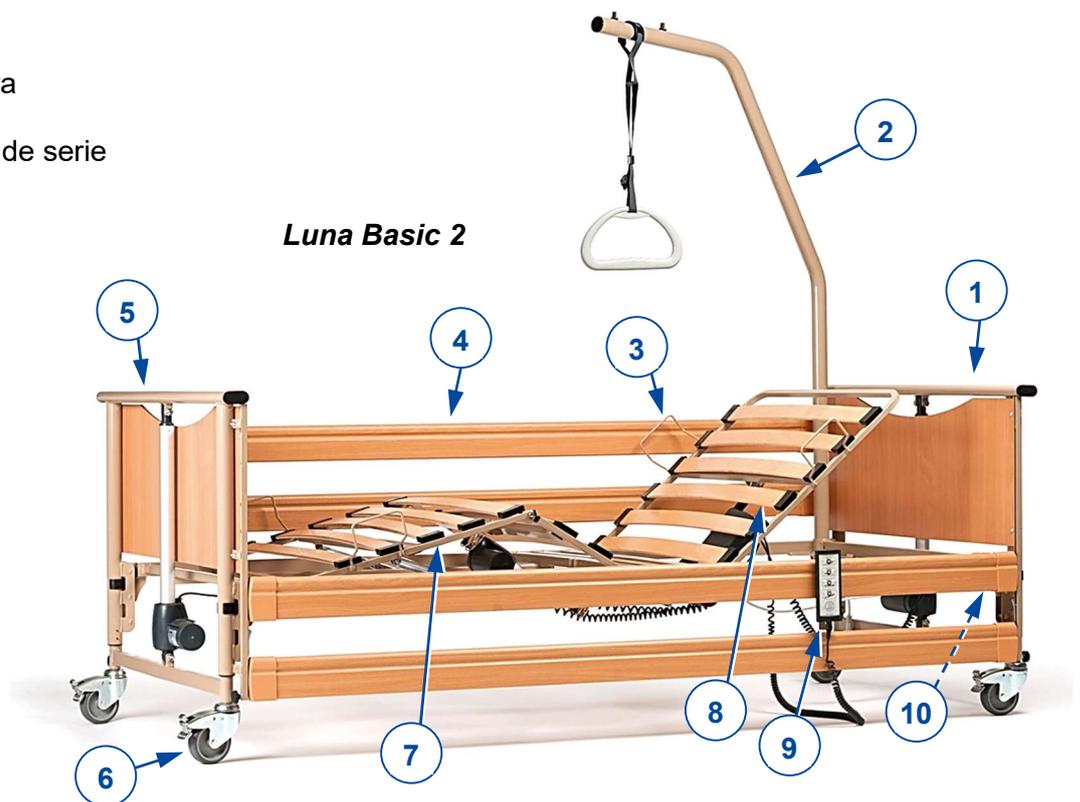

ES

1. Cabecero
2. Soporte
3. Tope de colchón
4. Barandilla lateral
5. Piecero
6. Rueda
7. Pies
8. Cabecera
9. Mando
10. Número de serie

Luna UL 2

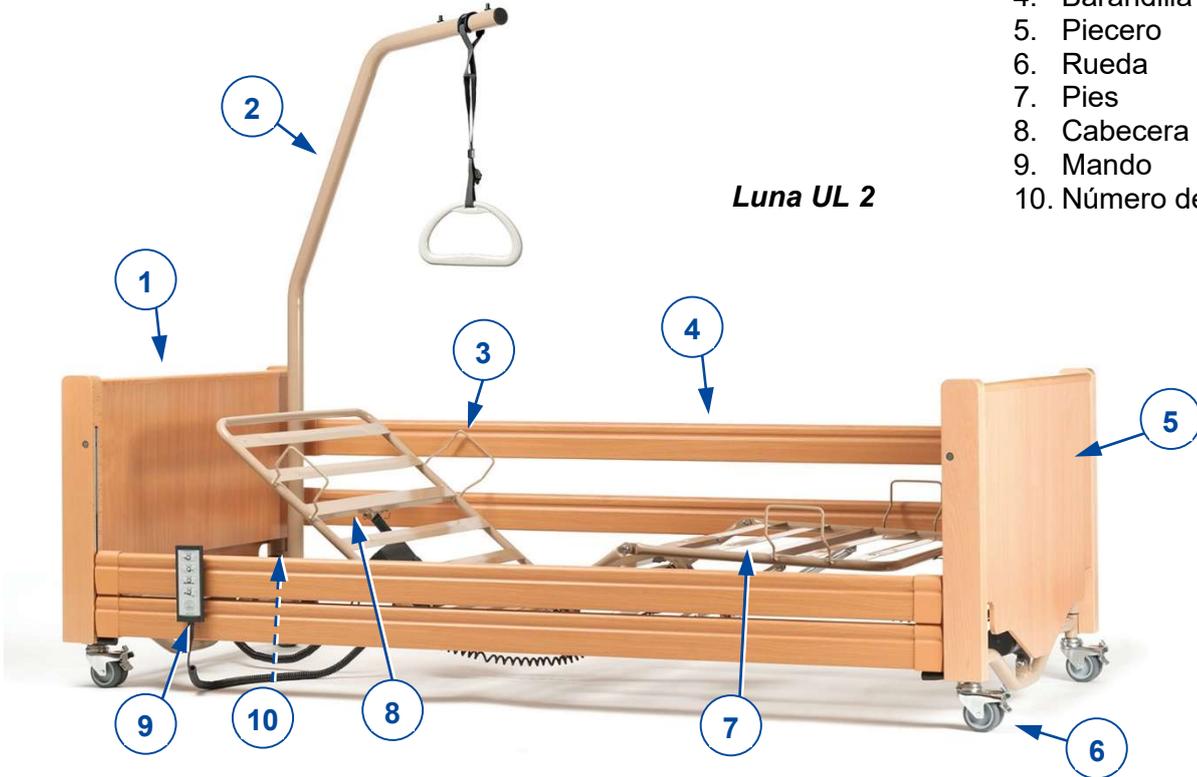



2 Paquete de entrega

Los siguientes componentes forman parte de la entrega:

- Cabecero y piecero con motores + paneles de madera
- Somier de laminas, pies, incl. motor
- Somier de laminas, cabecero, incl. transformador y motor
- Raíles laterales (2 x 2 barandillas de Madera)
- Incorporador + triangulo (opcional)
- Mando
- Manual de instrucciones
- Accesorios opcionales

ES

Antes del uso, compruebe que todo viene incluido y que ninguna de las piezas esté dañada.

3 Montaje

**PRECAUCIÓN**

Riesgo de lesiones

- Utilizar solo la configuración descrita en este manual.
- Evitar pillarse las manos durante el montaje, el desmontaje o el uso de la cama.
- Asegurarse de que no haya partes del cuerpo u objetos entremedias cuando se ajusten las bisagras, las juntas u otras piezas de sujeción.
- Utilizar solo piezas originales y piezas de repuesto aprobadas por Vermeiren.

**Observaciones importantes**

- Léase el manual de usuario de esta cama.
- Téngase siempre en cuenta los detalles técnicos y los límites de uso previsto; véase el manual de usuario.
- Para más información, contactar con Vermeiren.

3.1 Herramientas

Para montar la cama no son necesarias herramientas.

3.2 Montaje de la cama



PRECAUCIÓN


Riesgo de lesiones

- Mantenga los dedos y los cables eléctricos alejados de las piezas móviles y asegúrese de que no queden atrapados entre los componentes durante el montaje.
- En la zona de montaje no deben entrar otras personas u otros objetos.

ES

Siga el orden de montaje tal y como se explica a continuación.

3.2.1 Cabecero / piecero

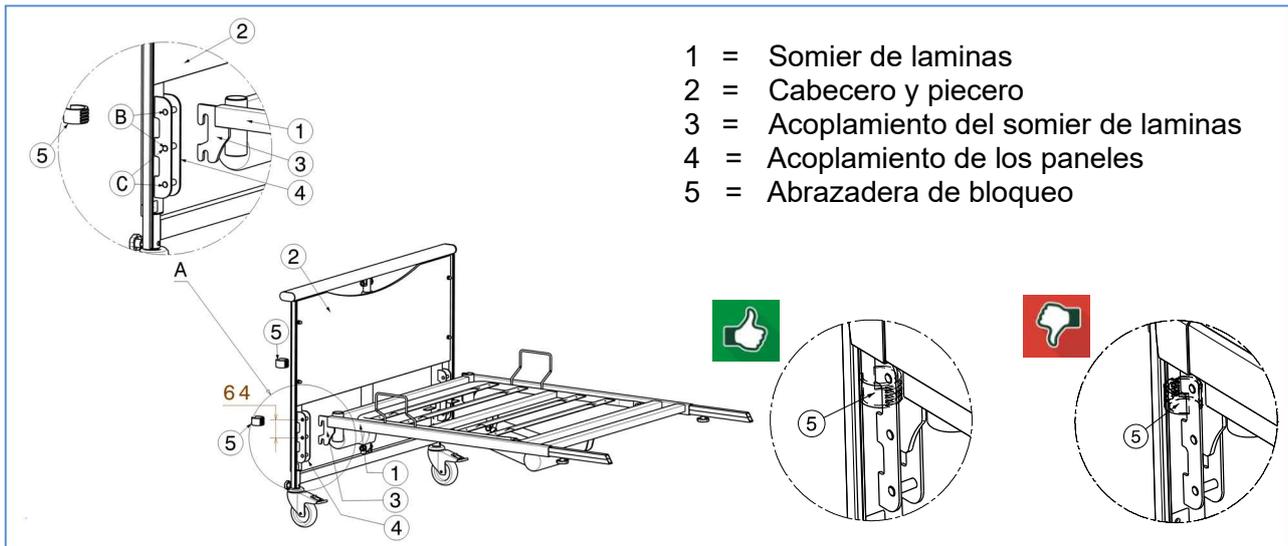


- 1 = Somier de laminas
- 2 = Cabecero y piecero
- 3 = Acoplamiento del somier de laminas
- 4 = Acoplamiento de los paneles
- 5 = Abrazadera de bloqueo

1. Monte el acoplamiento del somier de laminas (3) en el acoplamiento del panel de cabecera (4).
2. Asegure el somier de laminas (1) con las abrazaderas de bloqueo (5).
3. Repita este procedimiento para el piecero. Verifique que los somiers estén montados correctamente.

El somier de láminas puede montarse en dos posiciones distintas (B, C): diferencia de 64 mm (No para Luna UL 2).

3.2.2 Somier de laminas

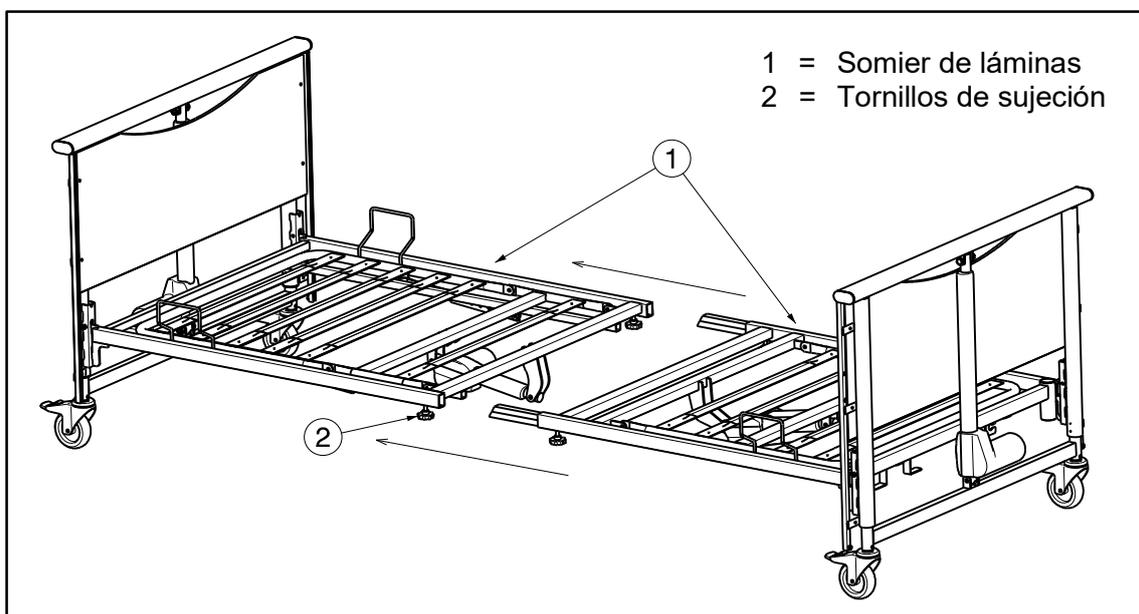

- 1 = Somier de láminas
- 2 = Tornillos de sujeción

- Afloje las palomillas(2), si es necesario.
- Levante ambos somiers de láminas (1) e insértelos entre sí.
- Reapriete adecuadamente las palomillas en la conexión (2) del somier de láminas.

3.2.3 Barandillas laterales de madera


Ajuste la altura de la cama en una posición intermedia. Con una altura demasiado baja no se pueden montar las barandillas laterales. Con una altura demasiado alta deberá empujar las barandillas laterales un buen trecho hacia arriba.


Para Luna 2, Luna Basic 2

**ADVERTENCIA**

Riesgo de lesiones


- Las barandillas se pueden montar en posición alta o baja. Coloque las barandillas en la posición inferior cuando el somier esté colocado en la altura inferior.
 1. Inserte el tope (5) y el tornillo (6) en el orificio superior o inferior según la altura deseada de las barandillas laterales.
 2. Afloje las contratuercas (4), si es necesario.
 3. Introduzca la guía de tornillos (1) a derecha e izquierda de la barandilla de madera superior. Introduzca la guía de tornillos (1) a izquierda y derecha en la barandilla de madera inferior (2).
 4. Deslice las guías de tornillos (1) + los listones de madera (2) en las guías de deslizamiento correspondientes (3) del cabecero y piecero. Levante el listón de madera superior hasta que la barandilla lateral de madera haga tope.
 5. Introduzca las contratuercas (4) y apriételas manualmente.
 6. Repita estos pasos en el otro lado.

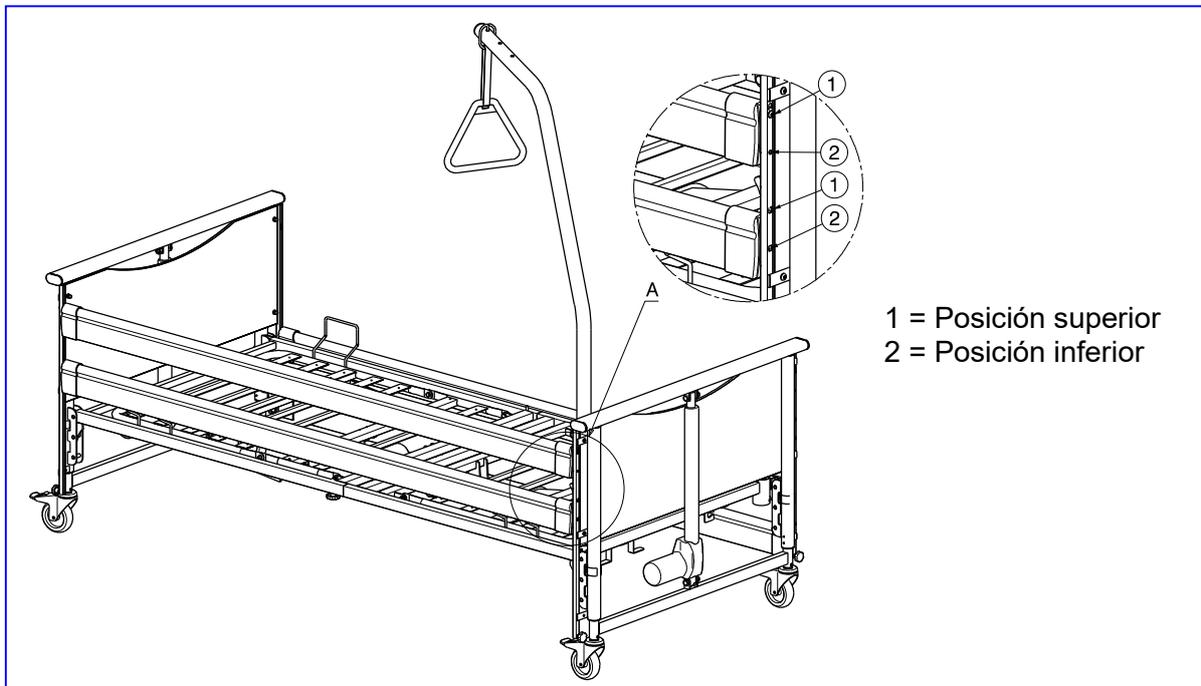

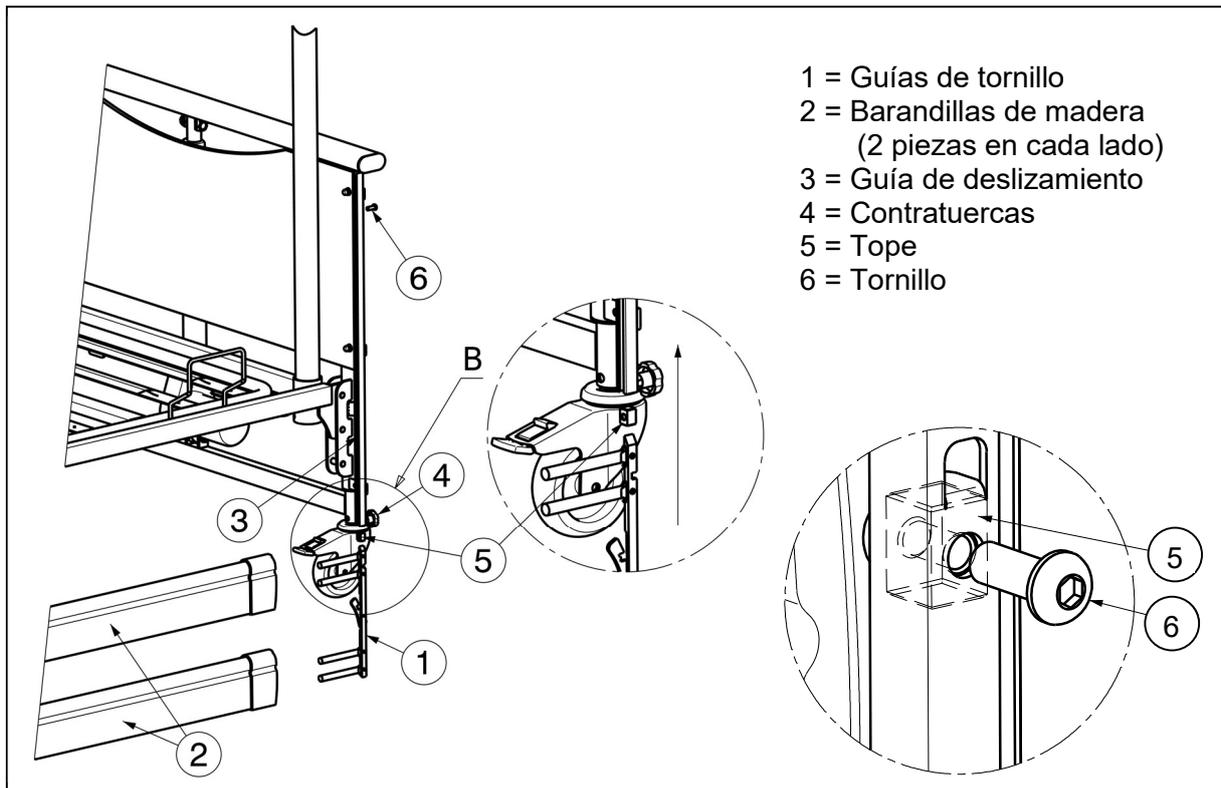

- 1 = Guías de tornillo
- 2 = Barandillas de madera
(2 piezas en cada lado)
- 3 = Guía de deslizamiento
- 4 = Contratuercas
- 5 = Tope
- 6 = Tornillo

Para Luna UL 2

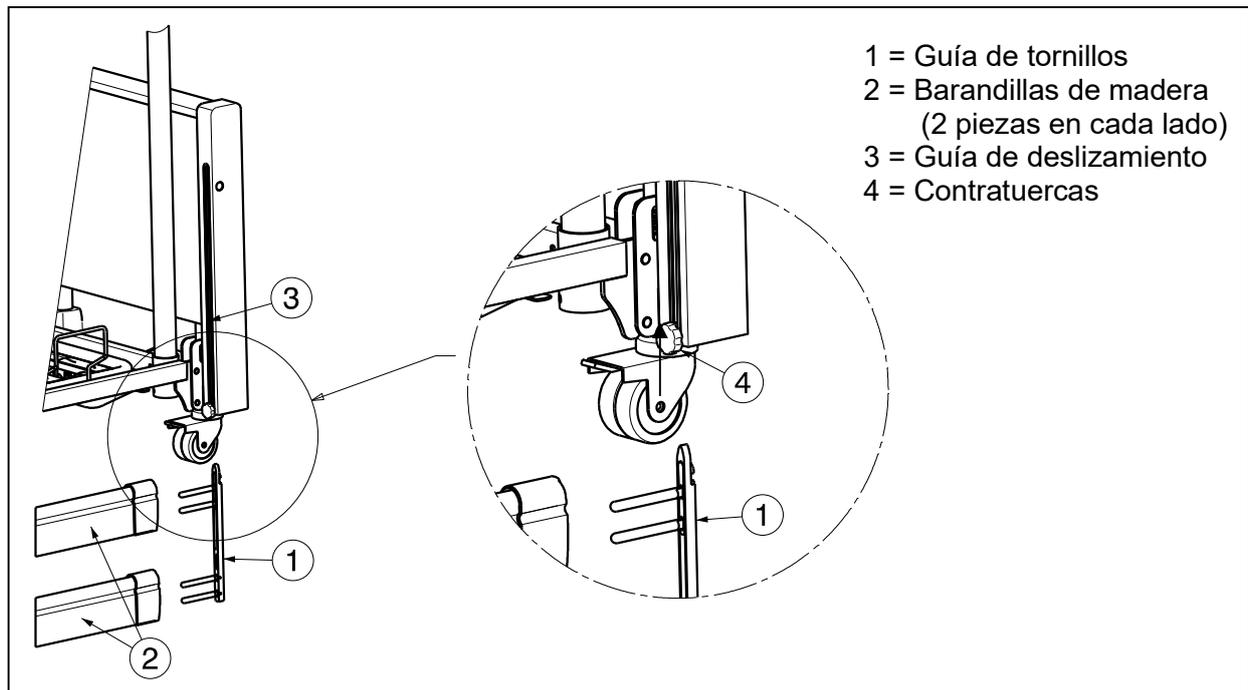


- 1 = Guía de tornillos
- 2 = Barandillas de madera
(2 piezas en cada lado)
- 3 = Guía de deslizamiento
- 4 = Contratuercas

1. Afloje las contratuercas (4), si es necesario.
2. Introduzca la guía de tornillos (1) a derecha e izquierda de la barandilla de madera superior. Introduzca la guía de tornillos (1) a izquierda y derecha en la barandilla de madera inferior (2).
3. Deslice las guías de tornillos (1) + los listones de madera (2) en las guías de deslizamiento correspondientes (3) del cabecero y piecero. Levante el listón de madera superior hasta que la barandilla lateral de madera haga tope.
4. Introduzca las contratuercas (4) y apriételas manualmente.
5. Repita estos pasos en el otro lado.

3.2.4 Barandillas partidas

i Tenga en cuenta la diferencia entre las barandillas para el cabecero y las que son para el piecero (las barandillas del cabecero son más cortas que las barandillas del piecero)


1. Tome una de las barandillas partidas.
2. Coloque las fijaciones de la barandilla partida (1) sobre el soporte del chasis del colchón (2).
3. Apriete firmemente los dos tornillos (3) en la parte inferior de cada fijación.
4. Repita para en las demás barandillas partidas.
5. Asegúrese que todas las barandillas laterals están firmemente sujetas en su lugar

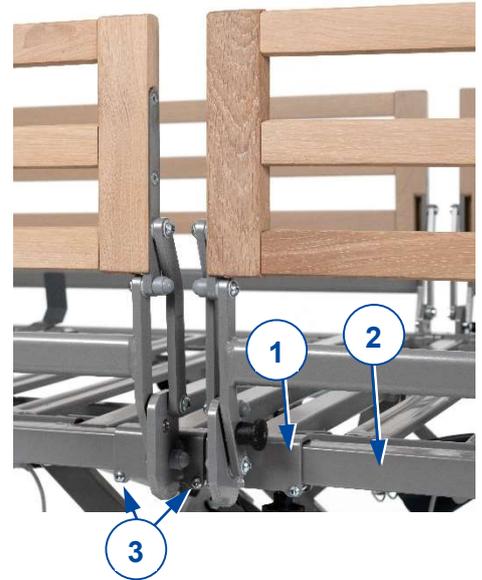

3.2.5 Conexiones del transformador

PRECAUCIÓN Riesgo de lesiones

- No coloque objetos en la conexión ni el cable y protéjalos contra cargas mecánicas.
1. Se requiere una toma de corriente A 220 V / 230 V, 50 Hz de acuerdo con las especificaciones de VDE.
 2. El diagrama de las conexiones del transformador se encuentra en la figura de abajo:

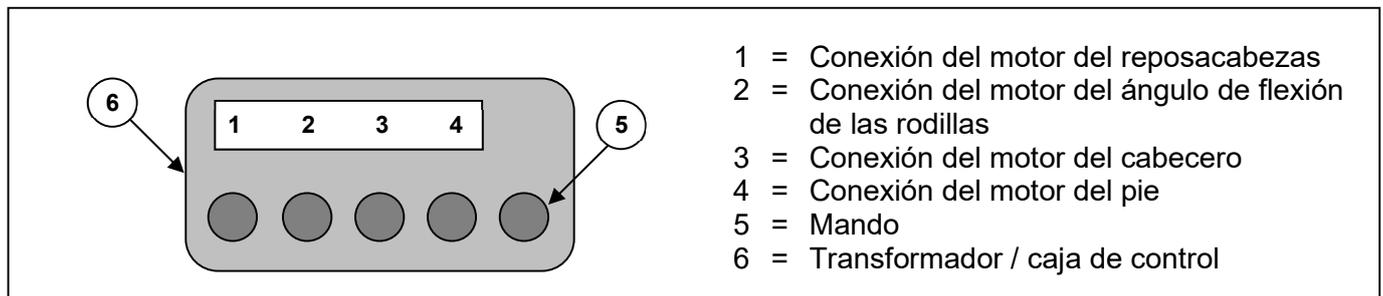

i Los conectores de los motores están marcados con el mismo número que las conexiones del transformador.

Agarre el conector solo para retirarlo de la toma de corriente.

El cable de alimentación no debe tener lazos o pliegues y no debe pasar por bordes afilados. Proteger el cable de alimentación y el cable del mando para que no resulten aplastados.


3.3 Descarga de tensión y cable de alimentación

PRECAUCIÓN Riesgo de daños


- No retirar la unidad de descarga.
- No debe acoplarse o colgarse nada de la unidad de descarga.
- El cable de alimentación debe tenderse con cuidado evitando pliegues y tirones y sin tocar el suelo.

Bajo la barra transversal del cabecero del somier de láminas puede encontrar una conexión para fijar el sistema de alivio de tensiones.

1. Insertar la unidad de descarga del cable de alimentación (4) en su apoyo (3).
2. Dejar la longitud deseada del cable de alimentación (1) para que el cable de alimentación (2) pueda tenderse debajo del somier sin quedar colgando. Prestar atención a que el cable (2) no esté bajo tensión en ninguna posición de ajuste.
3. Fijar el cable de alimentación apretando adecuadamente la unidad de descarga de tensión del cable (4).
4. Fijar la posición de la unidad de descarga apretando manualmente la junta roscada (5).

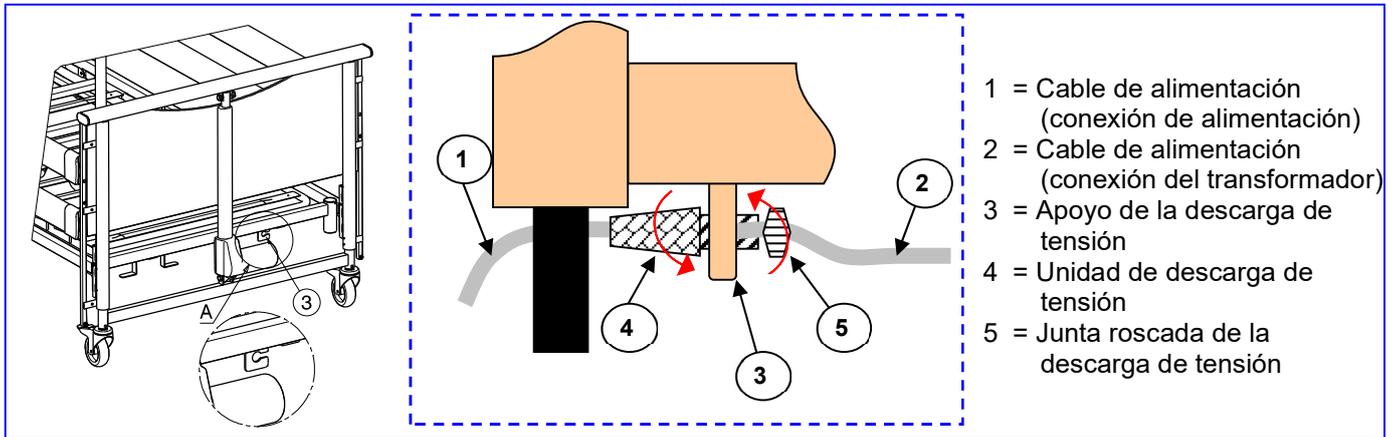

3.4 Colocación de cables

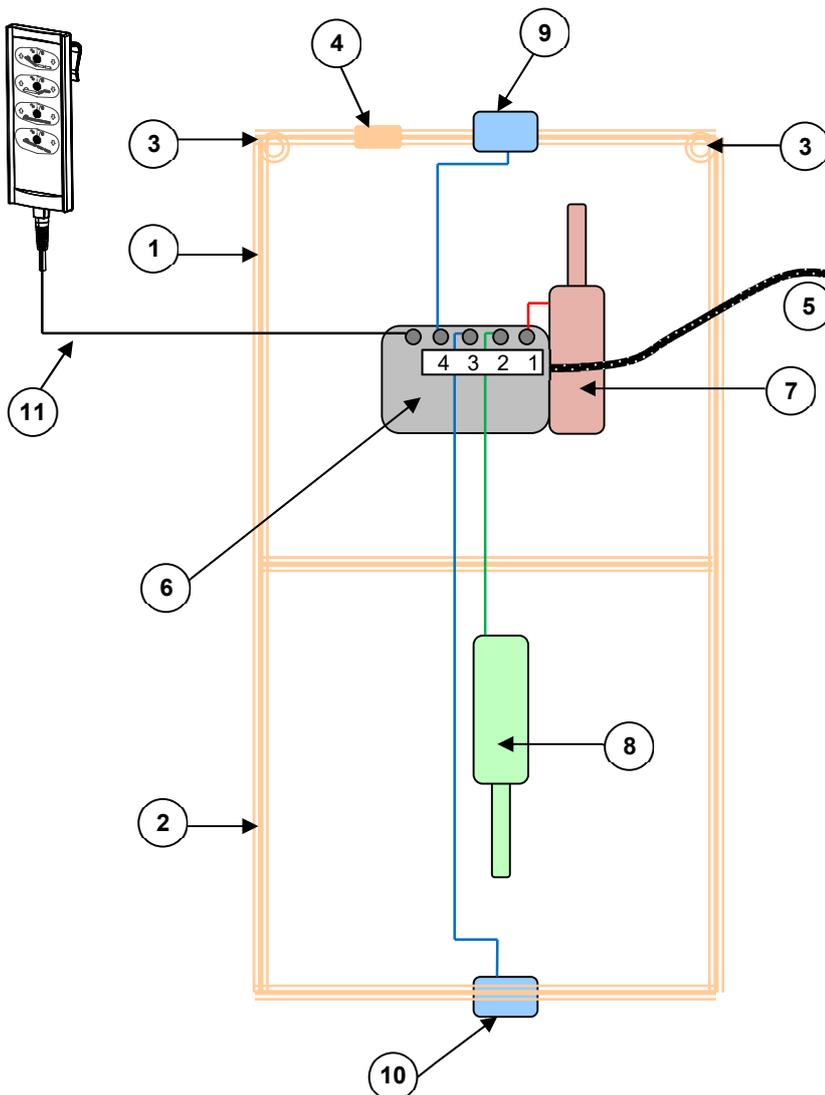

1. Extremo de la cabeza del somier
2. Extremo de los pies del somier
3. Soporte para el incorporador
4. Descarga de tensión
5. Cable de alimentación
6. Caja de control
7. Motor de la superficie del cabecero
8. Motor de ángulo de doblez de las rodillas
9. Motor del cabecero
10. Motor del piecero
11. Mando

Todos los cables dentro del bastidor y el somier deben colocarse de modo que se evite el contacto con el suelo para evitar su deformación y/o aplastamiento. Insertar los cables de alimentación de los motores en la abertura de los soportes de los motores.


3.5 Transporte

PRECAUCIÓN Riesgo de lesiones o daños

Fijar bien todas las piezas de la cama y el carro de transporte al vehículo para evitar que se muevan durante el transporte.



ES

3.5.1 Luna 2, Luna Basic 2

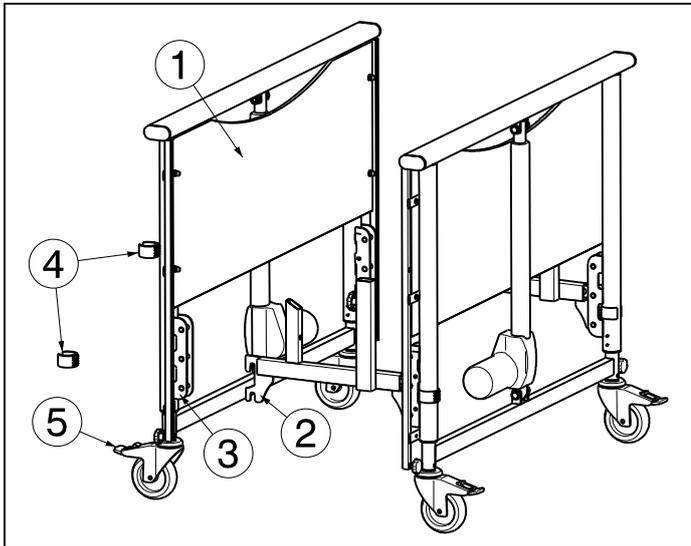

1. Coja los paneles (1).
2. Monte el acoplamiento del set de transporte (2) en el acoplamiento de los paneles (3). Trabe con las abrazaderas de bloqueo (4). Monte el set de transporte en la posición inferior de los paneles.
3. Trabe los frenos de los paneles (5).

4. Tome el lado de los pies (6) y sujételo con el motor ubicado en el lado inferior.
5. Deslice el tubo del lado de los pies (6) dentro del tubo del set de transporte (7). Asegure el lado de los pies (6) con los pomos en forma de estrella (8).

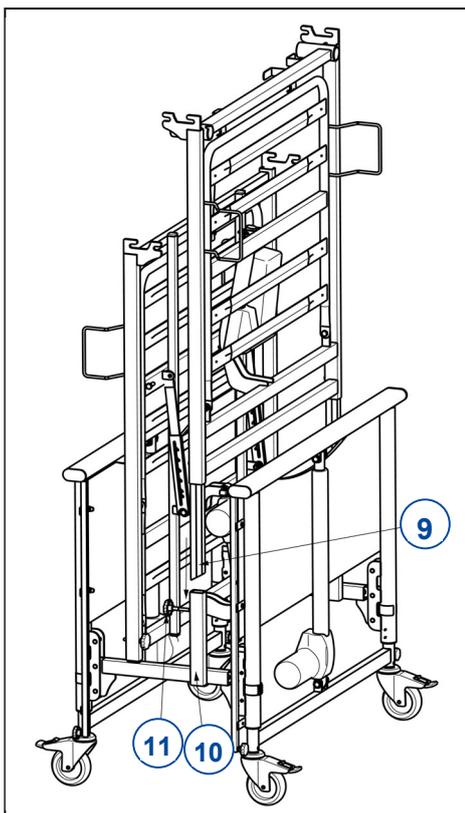
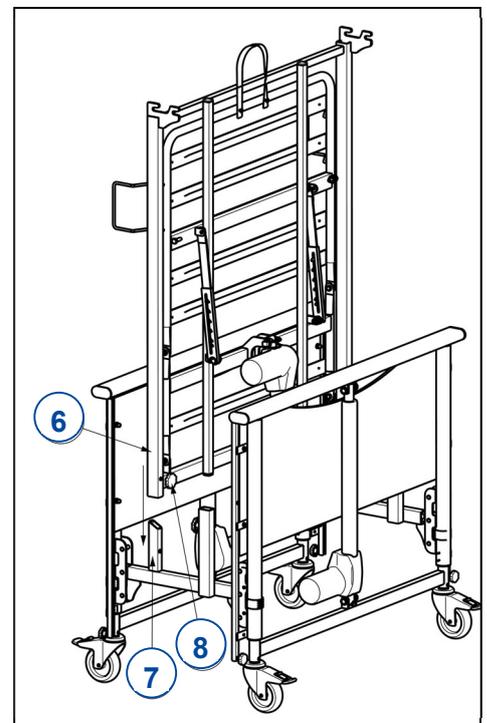


6. Tome el lado del cabecero (9) y sujételo con el motor ubicado en el lado superior.
7. Deslice el tubo del lado del cabecero (9) dentro del tubo del set de transporte (10). Asegure el lado del cabeceros con los pomos en forma de estrella (11).


3.5.2 Kit de transporte vertical Luna 2, Luna Basic 2, Luna UL 2

ES

1. Agarre el cabecero y sujételo con el motor hacia el interior del juego de transporte.
2. Deslice el tubo del chasis de la cama sobre el tubo corto (1) del kit de transporte. Deje que el otro extremo descance sobre el tubo largo del kit de transporte (2).
3. Asegure el cabecero con el pomo de estrella (3).
4. Repita los pasos anteriores para el reposapiés.

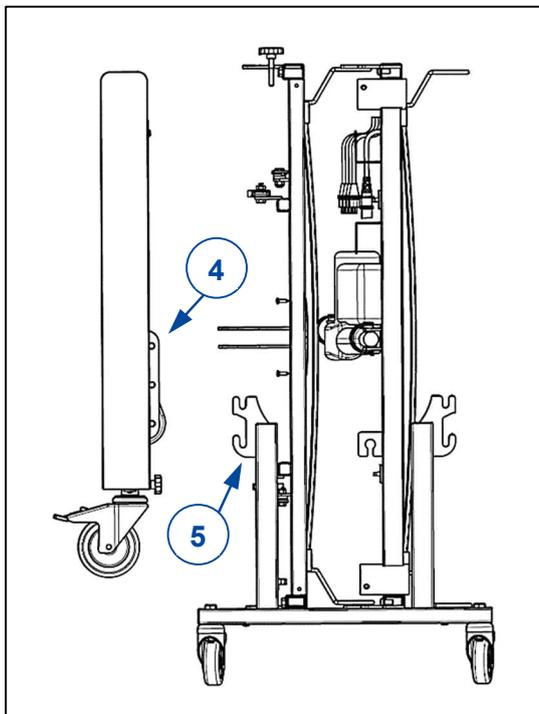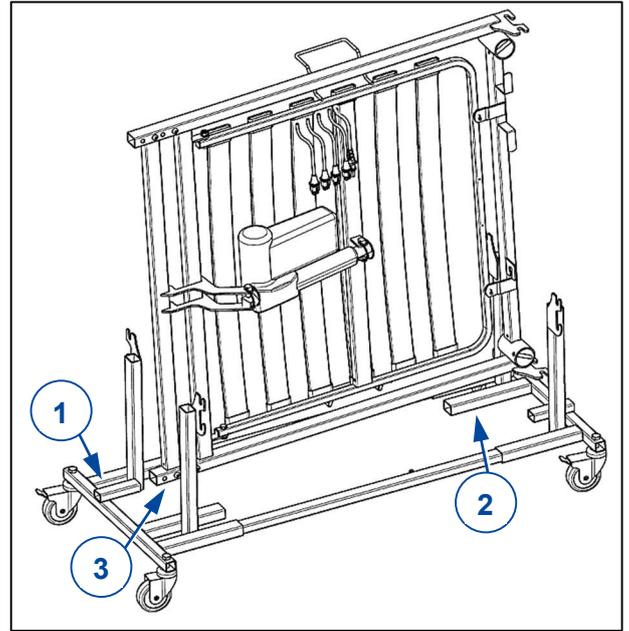


5. Agarre el cabecero y piecero (paneles de madera)
6. Coloque los accesorios del panel (4) en los ganchos (5) del kit de transporte. Bloquéelo con las abrazaderas de bloqueo.
7. Repita lo mismo para el otro panel.

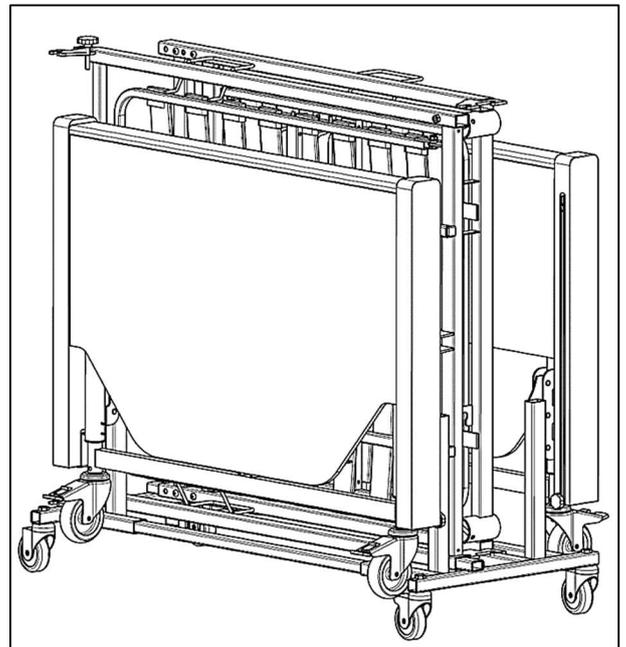

3.6 Incorporador (opcional)

La vara de levantamiento puede montarse en cualquiera de los lados del extremo de la cabeza.

ES

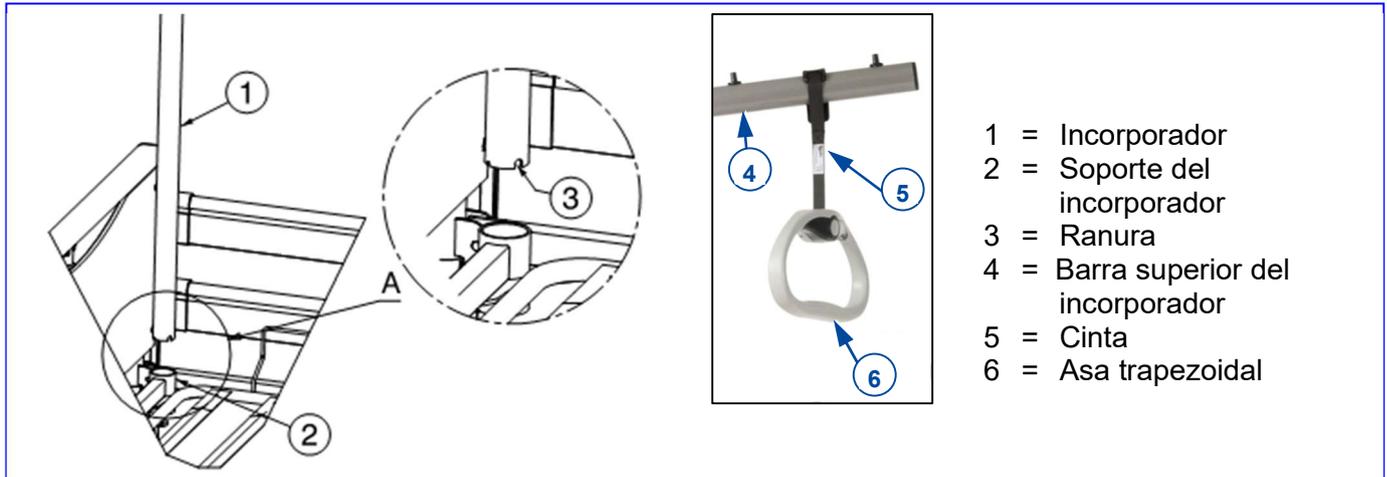

1. Insertar el incorporador (1) todo lo que se pueda en el soporte (2).
2. Deje que la ranura del incorporador (3) se deslice sobre el tubo en el soporte.
3. Pasar la cinta por el extremo de la barra superior (4) hasta la posición deseada.
4. Pasar la cinta (5) por el asa trapezoidal (6). Ajustar su longitud y fijar la cinta.


3.7 Bajada de emergencia del cabecero

ADVERTENCIA Riesgo de lesiones

- Compruebe que no haya objetos o partes corporales entre el cabecero y el chasis
- Sólo se permite efectuar la bajada de emergencia si hay al menos dos personas disponibles.

El cabecero se puede bajar manualmente (bajada de emergencia en caso de que falle el motor):

1. Sujete firmemente el cabecero para evitar que se caiga.
2. Una segunda persona puede liberar el pasador de suspensión doblando el lote de sujeción y tirando del pasador de la suspensión del motor.
3. Baje el cabecero con cuidado.

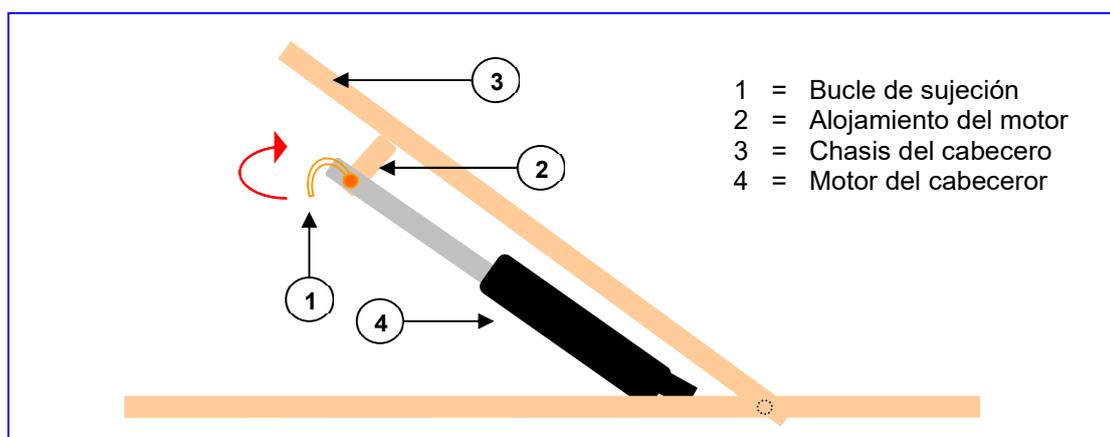



Vermeiren GROUP
Vermeirenplein 1 / 15
2920 Kalmthout
BE

sitio web: www.vermeiren.com

Instrucciones destinadas a los distri-buidores especializados

El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto y se debe adjuntar a todas las producto que se vendan.

Versión: A, 2021-03

Basic UDI: 5415174 181210Luna 2 5V
5415174 181210LunaBasic2 ZG
5415174 181210Luna UL 2 HK

Todos los derechos reservados, incluidos los de la traducción.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente manual de cualquier forma (impresión, fotocopia, microfilm o cualquier otro procedimiento), así como la edición, copia o distribución empleando sistemas electrónicos, sin el permiso escrito del editor.