



ACOPLE - PASO A PASO

- Asegúrate de que la handbike esté apagada antes de acoplarla o desacoplarla.
- Recuerda accionar siempre los frenos de la silla de ruedas antes de realizar cualquier maniobra.
- Verifica que la handbike esté correctamente acoplada a la silla de ruedas antes de su uso.
- Como ocurre con todas las piezas móviles, existe el riesgo de que los dedos o la ropa queden atrapados.
- Presta especial atención al manipular las abrazaderas del tubo.



Introduce el sub-armazón en las abrazaderas del tubo.



Gira los pomos de las abrazaderas en sentido horario hasta que queden bien fijadas sujetando de manera firme los tubos del sub-armazón.



Toma la hanbike e introduce el pin de bloqueo en el soporte central del sub-armazón.

Empulse



Empuja el manillar hacia delante / arriba hasta que el pasador de bloqueo quede bien fijado en su posición. Una vez que la handbike está completamente bloqueada ya puedes liberar los frenos de la silla de ruedas.



Escanea el código QR para ver los vídeos de puesta en marcha y ajuste.







DESACOPLE - PASO A PASO

- Asegúrate de que la handbike esté apagada antes de acoplarla o desacoplarla.
- Recuerda accionar siempre los frenos de la silla de ruedas antes de realizar cualquier maniobra.
- Verifica que la handbike esté correctamente acoplada a la silla de ruedas antes de su uso.
- Como ocurre con todas las piezas móviles, existe el riesgo de que los dedos o la ropa queden atrapados.
- Presta especial atención al manipular las abrazaderas del tubo.



Baja lentamente la handbike hasta que las ruedas de la silla toquen el suelo. Si quieres retirar el

sub-armazón, sigue los pasos 3 y 4.



Afloja los tornillos de las abrazaderas del tubo en ambos lados del armazón y tira del sub-armazón hasta que los tubos se liberen completamente de las abrazaderas.



Extrae el sub-armazón de las abrazaderas del tubo.





