



# Luna

Silla de ruedas  
manual de aluminio

## MANUAL DE USUARIO

Ref. SALLUNA

más de 50 años viviendo sin límites

### ! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

**www.totalcare-europe.com**

# DESDE TOTALCARE EUROPE LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA.

Gracias,  
por adquirir un producto de **IM by TotalCare Europe**.  
El producto que usted ha adquirido está dotado  
de la más avanzada tecnología y ha soportado las  
pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros  
productos ofrezcan las mejores prestaciones,  
haciendo que usted pueda disfrutar cada día más  
de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer  
las instrucciones que le proporcionamos. Así por-  
drá familiarizarse con su nueva **silla de ruedas  
Luna**, que le permitirá obtener el máximo rendi-  
miento y vida útil de esta.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

# GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1 — Partes de la silla.....</b>            | <b>4</b>  |
| <b>2 — Descripción del producto .....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>3 — Características del producto .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>4 — Uso .....</b>                          | <b>7</b>  |
| <b>5 — Mantenimiento.....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>6 — Aviso .....</b>                        | <b>9</b>  |
| <b>7 — Garantía.....</b>                      | <b>10</b> |

## 1. PARTES DE LA SILLA



## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO

La silla de ruedas Luna se caracteriza por su diseño práctico y ligero, que permite transportarla con facilidad. Incorpora un cinturón abdominal para seguridad del usuario. Proporciona comodidad y versatilidad, con los reposapiés plegables y los reposabrazos abatibles.

### 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



#### INFORMACIÓN GENERAL

##### Medidas

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Ancho total (Talla 40)                                      | 47,5 cm |
| Ancho total (Talla 44)                                      | 51,5 cm |
| Profundidad total sin reposapiés sin antivuelcos (Talla 40) | 70 cm   |
| Profundidad total sin reposapiés sin antivuelcos (Talla 44) | 69,5 cm |
| Profundidad total                                           | 88,5 cm |
| Ancho total plegada                                         | 22 cm   |
| Alto total                                                  | 87,5 cm |
| Alto del asiento al suelo                                   | 45,5 cm |

##### Peso

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Peso total (Talla 40) | 7,65 Kg |
| Peso total (Talla 44) | 7,80 Kg |
| Peso máximo soportado | 100 kg  |

|          |          |       |       |
|----------|----------|-------|-------|
| Material | Aluminio | Color | Metal |
|----------|----------|-------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ancho del asiento       | 39 / 43,5     |
| Profundidad del asiento | 36 cm         |
| Tipo de asiento         | Fijo          |
| Material del asiento    | Tela ignífuga |

Respaldo

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Ancho del respaldo (Talla 40) | 38 cm         |
| Ancho del respaldo (Talla 44) | 42 cm         |
| Alto del respaldo             | 39 cm         |
| Tipo de respaldo              | Fijo          |
| Material del respaldo         | Tela ignífuga |



Reposabrazo abatible

Reposabrazos

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Largo del reposabrazos    | 26 cm     |
| Ancho de reposabrazos     | 3,5 cm    |
| Tipo de reposabrazos      | Abatibles |
| Material del reposabrazos | Espuma    |



Manilla de freno de mano

Reposapiés

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tipo de reposapiés      | Plataforma Abatible |
| Material del reposapiés | Aluminio            |

Ruedas

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Medidas ruedas delanteras | 15,5 cm |
| Medidas ruedas traseras   | 20 cm   |
| Ancho ruedas delanteras   | 2 cm    |
| Ancho ruedas traseras     | 3 cm    |
| Tipo de ruedas delanteras | Macizas |
| Tipo de ruedas traseras   | Macizas |



Cinturón de asiento

Otras características

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Tipo de freno   | Freno bloqueo                        |
| Tipo de plegado | Cruceta simple con 4 estabilizadores |

## 4. USO Y MONTAJE

### 4.1. BLOQUEO DEL RESPALDO

Gire el asa hacia arriba hasta que quede bloqueada.



### 4.2. TIRE DEL REPOSAPIÉS HACIA FUERA

Sujete la parte exterior del reposapiés y tire de él lentamente.



### 4.3. APERTURA DEL MARCO

Empuje suavemente hacia abajo ambos lados del asiento hasta que el marco se abra.



### 4.4. BAJAR EL REPOSABRAZOS

Gire el reposabrazos 90° hacia abajo.



### 4.6. PLEGADO DEL RESPALDO

Presione la palanca y gire el respaldo hacia abajo.



#### 4.5. PLEGADO DEL BASTIDOR Y DEL REPOSAPIÉS

Sujete el tapizado del asiento y el reposapiés, tire de ellos suavemente hacia arriba hasta plegar el armazón.



#### 4.6. SUBIR EL REPOSAPIÉS

Suba el reposapiés hasta que entre en contacto con el cinturón de los pies.



#### 4.7. AUTOBLOQUEO

Empuje hacia arriba la manilla del freno de mano en autobloqueo cuando el acompañante salga





## 5. MANTENIMIENTO



**La silla de ruedas no está certificada por el crash test, por lo que no puede ser utilizada para el transporte en vehículos adaptados.**

- Compruebe que los tornillos están apretados y la estabilización del armazón de la silla de ruedas antes de utilizarla.
- Los usuarios no deben exceder el peso soportado (100Kg)
- Añada un poco de aceite lubricante en las piezas giratorias con regularidad
- Al girar en una curva cerrada, reduzca la velocidad para evitar el vuelco.
- No se incline fuera de la silla de ruedas, ya que esto cambiaría su centro de gravedad y podría provocar un vuelco.
- No se apoye en el reposapiés para evitar volcar.
- Realice una limpieza frecuente y una desinfección periódica.
- Coloque la silla de ruedas en un entorno seco y ventilado.

## 6. AVISO

- Se aconseja utilizar la silla en superficies planas, dentro o fuera de una habitación, en recorridos más largos es preferible que siempre haya un acompañante para poder ayudar al usuario, en caso de encontrarse con obstáculos.
- La silla tiene una capacidad máxima de 120kg.
- Para utilizar la silla de ruedas sin problemas, la velocidad debe ser de 3 a 5km/h.
- Los frenos se utilizan para subir o bajar, para parar la silla. No utilizar los frenos si está en movimiento, especialmente si se sube o baja una pendiente, hay riesgo de volcar.
- Los usuarios no deben incorporarse sobre los reposapiés podrían volcar la silla y caer.
- Mientras usa la silla de ruedas en una pendiente no incline la silla ni gire repentinamente.

## 7. GARANTÍA

### DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

### ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

### PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

### LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

**NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.**

**CONTACTE CON SU PROVEEDOR.**

## SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO

# LUNA

La silla de ruedas Luna se caracteriza por su diseño práctico y ligero, que permite transportarla con facilidad. Incorpora un cinturón abdominal para seguridad del usuario.



## Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

## Manual de usuario

Silla de ruedas manual de aluminio, Luna

V3 · 29/04/2022