

MEDIAS DE COMPRESIÓN:

A754-40 y A754-41

Referencia: H4658

SammonsPreston®

INDICACIONES

Para ayudar en la aplicación de medias de compresión sin doblar innecesariamente la cintura o las caderas.

PRECAUCIONES

Si la flexión de las caderas está restringida a más de 90°, consulte a un profesional de la salud para obtener instrucciones sobre el uso adecuado.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Lavar con jabón y agua tibia.

INSTRUCCIONES DE USO

-Para ayudar a colocar la prenda de compresión de manera uniforme sobre la ayuda de la prenda, use guantes de goma o látex que se ajusten a la forma.

-Siéntese en el borde de una superficie firme y coloque los pies en el suelo.

-Sostenga la ayuda de la prenda de compresión ("ayuda para calcetines") firmemente en el regazo, con los bordes con muescas hacia el usuario y el borde del cordón hacia el piso (A).

-Alinee el talón de la prenda de compresión con la curva del calcetín.

-Abra la parte superior de la prenda de compresión y colóquela sobre la ayuda para calcetines (A).

-Con las palmas de ambas manos, empuje la prenda de compresión hacia abajo sobre la ayuda para calcetines hasta que el orificio para los dedos llegue a la ayuda para calcetines (B). Mantenga la prenda de compresión fruncida uniformemente a lo largo de las muescas y tenga cuidado de que no se extienda más allá del borde inferior de la ayuda para calcetines, donde se une el cordón (C).

-Deje caer el calcetín en el suelo delante del pie, con el talón de la prenda de compresión hacia abajo.

-Coloque el cordón a ambos lados de la pierna y sosténgalo al lado de la rodilla (D).

-Si es posible, apunte los dedos de los pies. Deslice el calcetín sobre el pie hasta que los dedos lleguen al final de la prenda de compresión. Mover los dedos de los pies puede ayudar a que la prenda se mueva sobre el pie.

-Tire del cordón por encima de la rodilla para pasar el calcetín por encima del talón y por la parte posterior de la pantorrilla.

-Sujete el cordón con firmeza cerca de la rodilla y tire suavemente de la ayuda para calcetines mientras coloca la prenda de compresión en su lugar.

-Continúe tirando del calcetín hasta que se suelte de la prenda de compresión.

(Patentes de EE. UU. Nos. 5,826,761 y Des. 414,911.)



A



B



C



D



ASP Global, LLC
7800 Third Flag Parkway,
Austell, GA 30168, USA
www.aspglobal.com
1-404-696-6999
Made in China



Authorized Representative:
CEpartner4U BV,
ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN,
THE NETHERLANDS
www.CEpartner4U.com

Distributed in the USA by:
Performance Health Supply, LLC.
W68 N158 Evergreen Blvd.
Cedarburg, WI 53012 USA
Phone: 800-323-5547
www.performancehealth.com



Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/Llobregat 12, Santa Perpètua, 08130, Barcelona
Tel. 935 74 74 74 Fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com, www.ayudasdinamicas.com

Distributed in the UK by:
Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Road
Huthwaite, Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire, NG17 2HU, UK
Phone: 03448 730 035
www.performancehealth.co.uk

Distributed in the EU by:
Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Road
Huthwaite, Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire, NG17 2HU, UK
Phone: 03448 730 035
www.performancehealth.co.uk



Language

Report any serious incident associated with the medical device to the manufacturer or its Authorized Representative and to the National Authority